

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/kompres-flex-max-2130-cm-sanity-p-3366.html>



Kompres FLEX MAX 21×30 CM SANITY

Numer katalogowy

6988


Producent

Sanity

Opis produktu

Kompres Flex Max jest największym kompresem żelowym w naszej ofercie. Wygodny kształt prostokąta umożliwia stosowanie na większej powierzchni ciała. Skuteczny okład na zimno lub ciepło sprawdzi się przy niezliczonych dolegliwościach bólowych ciała.

Kompres przeznaczony jest do wielokrotnego użytku, długo utrzymuje pożądaną – wysoką bądź niską temperaturę, w zależności od potrzeb.

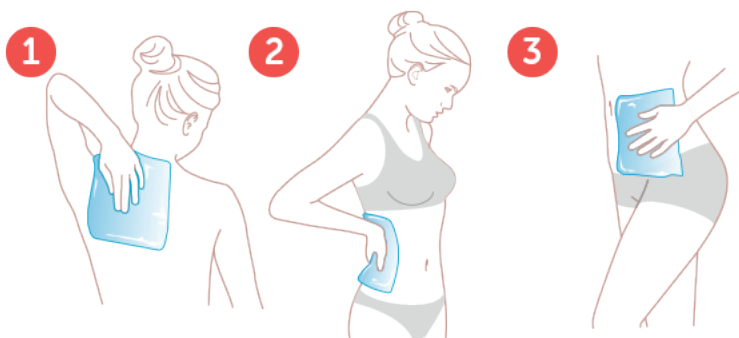

ZIMNE OKŁADY


Pomaga w urazach, takich jak skręcenia i zwichnięcia stawów dłoni, stłuczenia ręki, naderwanie ścięgien. Łagodzi przewlekły ból spowodowany urazami układu mięśniowo-szkieletowego, a także bóle zębów i głowy. Zmniejsza obrzęk, stany zapalne, zaczerwienienia. Przyspiesza wchłaniania krwiaków, siniaków, łagodzenia drobnych stłuczeń. Obniża temperaturę ciała w trakcie gorączki, łagodzi poparzenia. Pomaga zatamować krwotok z nosa.



Umieść kompres w zamrażarce na minimum 2 godziny

CIEPŁE OKŁADY

Wspomaga leczenie przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego. Ogranicza skurcze mięśni (np. ból pleców, bóle menstruacyjne, skurcze nóg). Przynosi ulgę w trakcie reumatoidalnego zapalenia stawów i bólu.

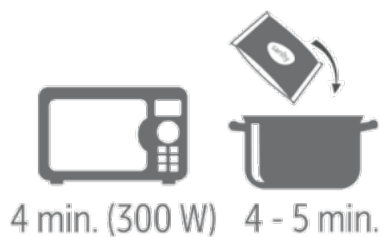

W kuchence mikrofalowej podgrzewaj ok. 4 minuty w temperaturze rozmrażania lub zanurz kompres w gorącej wodzie na ok. 5 minut.



Osusz, włóż do ochronnego pokrowca, a następnie zastosuj na ciało.

Nie należy stosować kompresu bezpośrednio na rany. Przeciwwskazania do stosowania znajdują się w załączonej wewnątrz opakowania broszurze informacyjnej.