

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/krotka-orteza-kolana-unloader-one-z-mechanizmem-zapadkowym-p-2378.html>



Krótka orteza kolana UNLOADER ONE® z mechanizmem zapadkowym

Numer katalogowy	12237
Producent	Ossur

Opis produktu

Unloader One to wygodna, pojedyncza, pionowa, lekka i dyskretna orteza, zawierająca 3-punktowy system dźwigniowy Unloader firmy Össur, o potwierdzonym klinicznie działaniu wykorzystującym podwójne taśmy Dynamic Force Straps, które można z łatwością regulować przy użyciu tarcz SmartDosing®. Oznaczone kolorami sprzączki Quick Fit ułatwiają nakładanie i zdejmowanie ortezy, a elastyczne elementy wzmacniające i oddychające wkładki zwiększają komfort oraz ograniczają przesuwanie się, umożliwiając odpowiednie dopasowanie. Jak dowodzą wyniki badań, orteza Unloader One łagodzi ból, usprawnia funkcjonowanie i pozwala na zmniejszenie ilości przyjmowanych leków przeciwbólowych.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Jednokompartментowa postać choroby zwyrodnieniowej stawu kolana o lekkim lub średnim natężeniu
- Inne schorzenia stawu kolanowego, w których stosowanie odciążenia jednokomorowego może być korzystne

FUNKCJE I KORZYŚCI

- Podwójne taśmy Dynamic Force Straps® zaprojektowano w celu zmniejszenia nacisku na wrażliwe powierzchnie kostne kolana, co przyczynia się do ograniczenia bólu.
- Lekki stelaż, perforowany w celu zapewnienia elastyczności oraz wentylacji i jednocześnie dyskretny, który dostosowuje się do anatomii pacjenta i umożliwia noszenie ortezy pod ubraniem.
- Tarcza SmartDosing®, niewymagająca stosowania narzędzi, umożliwia kontrolowanie natężenia odczuwanego bólu z jej pomocą można dokonywać regulacji ortezy umieszczonej pod ubraniem.
- Oznaczone kolorami sprzączki Quick Fit ułatwiają nakładanie i zdejmowanie ortezy.
- Chronione prawem patentowym silikonowe wkładki Sensil® zaprojektowano w celu ograniczenia przesuwania się ortezy.
- Dostępne w wersji standardowej i skróconej, aby możliwe było ich dopasowanie również do osób mających krótsze nogi.

WYMAGANE POMIARY

- Pomiar obwodu: 15 cm (6") pod środkiem rzepki

ORTEZA UNLOADER ONE Z TARCZĄ SMARTDOSING

Rozmiar	Obwód łydki	Lewa strona, przyśrodkowo	Prawa strona, przyśrodkowo	Lewa strona, lateralnie	Prawa strona, lateralnie
---------	-------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

S	31-35,5 cm	B-240618712	B-240518712	B-240628712	B-240528712
M	35,5-42,5 cm	B-240618713	B-240518713	B-240628713	B-240528713
L	42,5-51 cm	B-240618714	B-240518714	B-240628714	B-240528714
XL	51-61,5 cm	B-240618715	B-240518715	B-240628715	B-240528715

KRÓTKA ORTEZA UNLOADER ONE Z TARCZĄ SMARTDOSING

Rozmiar	Obwód łydki	Lewa strona, przyśrodkowo	Prawa strona, przyśrodkowo	Lewa strona, lateralnie	Prawa strona, lateralnie
XS	25-31 cm	B-241618711	B-241518711	B-241628711	B-241528711
S	31-35,5 cm	B-241618712	B-241518712	B-241628712	B-241528712
M	35,5-42,5 cm	B-241618713	B-241518713	B-241628713	B-241528713
L	42,5-51 cm	B-241618714	B-241518714	B-241628714	B-241528714
XL	51-61,5 cm	B-241618715	B-241518715	B-241628715	B-241528715

ORTEZA UNLOADER ONE Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM

Rozmiar	Obwód łydki	Lewa strona, przyśrodkowo	Prawa strona, przyśrodkowo	Lewa strona, lateralnie	Prawa strona, lateralnie
S	31-35,5 cm	B-240619712	B-240519712	B-240629712	B-240529712
M	35,5-42,5 cm	B-240619713	B-240519713	B-240629713	B-240529713
L	42,5-51 cm	B-240619714	B-240519714	B-240629714	B-240529714
XL	51-61,5 cm	B-240619715	B-240519715	B-240629715	B-240529715

KRÓTKA ORTEZA UNLOADER ONE Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM

Rozmiar	Obwód łydki	Lewa strona, przyśrodkowo	Prawa strona, przyśrodkowo	Lewa strona, lateralnie	Prawa strona, lateralnie
XS	25-31 cm	B-241619711	B-241519711	B-241629711	B-241529711
S	31-35,5 cm	B-241619712	B-241519712	B-241629712	B-241529712
M	35,5-42,5 cm	B-241619713	B-241519713	B-241629713	B-241529713
L	42,5-51 cm	B-241619714	B-241519714	B-241629714	B-241529714
XL	51-61,5 cm	B-241619715	B-241519715	B-241629715	B-241529715

ROZWIĄZANIA W LECZENIU KOLANA

Zaleca się standardową wersję dla pacjentów o wzroście 165-192 cm. Zaleca się krótką wersję dla pacjentów o wzroście poniżej 165 cm.

Zawias jest umieszczany po stronie dotkniętego przedziału

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS

Strona: Lewa strona, lateralnie , Lewa strona, przyśrodkowo , Prawa strona, lateralnie , Prawa strona, przyśrodkowo