

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/odciagacz-easycomfort-sanity-p-3382.html>



Odciągacz EASYCOMFORT SANITY


Numer katalogowy	7062
Producent	Sanity

Opis produktu

Odciągacz Easycomfort jest najbardziej zaawansowanym wyrobem tego typu w naszej ofercie.

Manualna obsługa gwarantuje wysokie bezpieczeństwo, oraz możliwość swobodnej kontroli tempa pracy aparatu. Wysokiej jakości odciągacz posiada dopasowaną i komfortową tarczę do nałożenia na pierś.

Budowa:

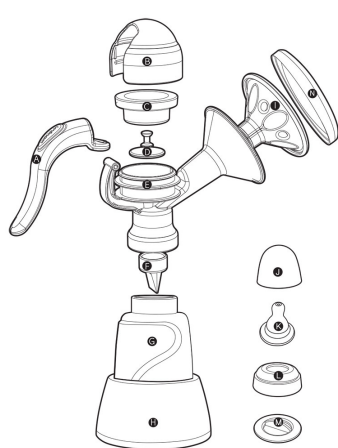

- A. Uchwyt (dźwignia)
- B. Osłonka membrany
- C. Membrana silikonowa
- D. Trzon
- E. Tarcza
- F. Zaworek
- G. Butelka
- H. Podstawa na butelkę
- I. Sylikonowa nakładka masująca
- J. Przykrywka na butelkę
- K. Smoczek
- L. Nakładka
- M. Dysk
- N. Osłonka na nakładkę silikonową.

Bezpieczeństwo:

Jest to produkt do stosowania indywidualnego (prze jedną osobę). Użycie przez więcej niż jedną osobę może spowodować problemy zdrowotne oraz pojawić mogą się wątpliwości co do skuteczności działania.

OSTRZEŻENIE:

Nie nadużywaj ani nie modyfikuj urządzenia.
Nie używaj smoczka od butelki jako smoczka uspokajacza.
Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
Zawsze używaj tego produktu pod nadzorem dorosłych
5 Zawsze stosuj oryginalne części.

Czyszczenie i dezynfekcja:

1. Umyj dokładnie wszystkie części płynem do mycia i wypłucz.
2. Zdezynfekuj części zgodnie z instrukcją producenta sterylizatora.
3. Osusz wszystkie części przed ponownym złożeniem.

UWAGA - PRODUKTY MOGĄ ULEC ZNISZCZENIU LUB ZNIEKSZTAŁCENIU JEŚLI BĘDĄ PODDANE WYSOKIEJ TEMPERATURZE (100°C) PRZEZ DŁUŻEJ IŻ 2 MINUTY.

Przewodnik użytkowania:

1. Umyj ręce przed użyciem oraz przemyj pierś.
2. Upewnij się, że odpowiednie części są zdezynfekowane.
3. Zrelaksuj się i stymuluj twój odruch odpływu pokarmu.
4. Umieść tarczę odciągacza na piersi,
5. Delikatnie i powoli masuj pierś aż do momentu pojawienia się pokarmu.
6. Delikatnie odciągaj pokarm naciskając dźwignię odciągacza na tyle na ile jest to komfortowe.

JAK PRZECHOWYWAĆ POKARM

Najlepiej jeśli możesz od razu podać pokarm dziecku, jeśli nie to wskazane będzie przechowanie pokarmu.

- Temperatura pokojowa do 3 godzin
- Chłodziarka do 1 dnia
- Zamrażarka do 3 miesięcy

NIE PRZETRZYMUJ POKARMU W GORĄCEJ WODZIE.

UWAGA: Schładzaj pokarm w lodówce przez 2 godziny zanim zamrozisz.

OSTRZEŻENIE: Opisz pokarm przechowywany w lodówce wg daty i godziny odciągnięcia. Nie mieszaj pokarmu przechowywanego w lodówce z zamrożonym.

JAK ROZMRAŻAĆ

1. Umieść zamrożony pokarm w lodówce na kilka godzin przed użyciem.
2. Przed karmieniem umieść pokarm w gorącej wodzie do momentu gdy osiągnie temperaturę pokojową.
3. Potrząśnij butelką ponieważ mleko tłuste może się oddzielić od chudego.

OSTRZEŻENIE: Nie rozmrażaj pokarmu w kuchence mikrofalowej. Nie zamrażaj ponownie rozmrożonego mleka.