

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/orteza-kregoslupa-ledzwiowego-z-pelota-lumbamed-plus-p-1292.html>



Orteza kręgosłupa lędźwiowego z pelotą Lumbamed® plus

Numer katalogowy	9732
Producent	Medi

Opis produktu

Orteza kręgosłupa lędźwiowego z pelotą

- Zintegrowana pelota Vario-Flex
- Idealne dopasowanie dzięki anatomicznie ukształtowanemu zapięciu
- Łatwe użycie dzięki zintegrowanym szlufkom na dłonie

Do leczenia bólu krzyża (lumbago) spowodowanego zaburzeniami stawu międzywyrostkowego

Lumbamed plus to orteza lędźwiowa z peloty. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu dolnej części kręgosłupa. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Stabilizacja odcinka lędźwiowego i połączenia lędźwiowo-krzyżowego za pomocą zintegrowanej peloty masującej
- Zmniejszenie lordozy odcinka lędźwiowego za pomocą ucisku proprioceptywnego w obszarze brzuszny

Sposób działania

Pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny. Lumbamed plus stabilizuje i odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Uciskająca dzianina oraz zastosowana pelota poprawiają ukrwienie i wywołują efekt masażu, łagodzącego ból, nie wpływając negatywnie na siłę mięśni. Maksymalną skuteczność opaski osiągają podczas aktywności fizycznej. Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień. Specjalny kształt w obrębie pachwiny (Comfort Zone) znacznie poprawia prawidłowe i wygodne położenie opaski. Decyzję o czasie noszenia opaski należy jednak podjąć na podstawie własnych odczuć. Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować opaskę. W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

Instrukcja dotycząca zakładania

Materiałową powłokę naciągnąć na wkładkę masującą, a następnie zamocować ją pomiędzy oboma usztywniaczami wypośredkowując ją bądź pozycjonując zgodnie z zaleceniem lekarza bądź specjalisty na środkowej szarej naszywce z rzepem. Wkładka powinna być umocowana w taki sposób, aby w trakcie noszenia jej dolny koniec stykał się z miejscem, w którym zaczyna się załamanie pośladka. Najpierw należy wsunąć lewą dłoń w wewnętrzną szlufkę po lewej stronie zapięcia. Pas owinąć dookoła tułowia, a następnie wsunąć prawą dłoń w zewnętrzną szlufkę po prawej stronie zapięcia. Obie strony zapięcia ściągnąć w środku w taki sposób, aby po zapięciu zachodziły na siebie równomiernie i możliwie jak najdalej. Pas założony jest prawidłowo, jeżeli dolna krawędź zapięcia znajduje się zaraz nad pachwiną

Skład produktu:

- Opaska: Poliamid, poliester, elastan
- Pelota: Poliuretan, polietylen

Instrukcja prania

Paski z rzepami należy przed praniem zapiać. Peloty nie należy prać. Należy ją czyścić wilgotną ściereczką. Płyny zmiękczające do płukania, tłuszcze, oleje, mleczka i maści mogą uszkodzić materiał i zniwelować efekt Clima Comfort. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Nieswoiste bóle w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- Odnawialne bóle w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa spowodowane zużyciem tkanki, np. ze względu na zmiany krążka międzykręgowego
- Podrażnienia stawu biodrowokrzyżowego
- Objawy przeciążenia na obszarze pomiędzy odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa a miednicą
- Słabe lub niedostatecznie rozwinięte mięśnie tułowia (plecy, brzuch)

Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie). Stosowanie łącznie z innymi produktami należy wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie.

Rozmiar

Damski

obwód bioder (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140
rozmiar	I	II	III	IV	V
numer artykułu	K.210.Δ41	K.210.Δ42	K.210.Δ43	K.210.Δ44	K.210.Δ45

Δ = uzupełnić kolor: 2 = srebrny, 8 = piaskowy

Męski

obwód pasa (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130
rozmiar	I	II	III	IV	V
numer artykułu	K.210.Δ31	K.210.Δ32	K.210.Δ33	K.210.Δ34	K.210.Δ35

Δ = uzupełnić kolor: 2 = srebrny, 8 = piaskowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V

Kolor: piaskowy , srebrny

TYP: Damski , Męski