

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/pas-brzuszy-stabilizujacy-pt0122-p-2535.html>



Pas brzuszny stabilizujący PT0122

Numer katalogowy

PT0122

Producent

Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- stabilizacja kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
- ochrona organów wewnętrznych (zwłaszcza nerek) szczególnie podczas uprawiania sportów (jazdy na motorze, rowerze, nartach) oraz podczas pracy
- doskonałe odprowadzanie ciepła i wilgoci na zewnątrz pasa

Pas przeznaczony jest zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, zwłaszcza prowadzących aktywny tryb życia.

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha 70 – 80 [cm]		81 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120	121 – 130	131 – 140

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Pas założyć na odcinek lędźwiowo – krzyżowy kręgosłupa, a następnie zapiąć z przodu na rzep.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem zapiąć rzep w celu uniknięcia pohaczenia.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i

skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.

- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL