

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/szyna-unieruchamiajaca-kolano-0-medi-jeans-p-1351.html>



Szyna unieruchamiająca kolano 0° medi Jeans

Numer katalogowy	9791
Producent	Medi

Opis produktu

Szyna unieruchamiająca kolano 0°

- Indywidualna regulacja
- Przyjazny dla skóry, nadający się do prania materiał frotte
- Wyjmowane pręty stabilizacyjne

Orteza unieruchamiająca kolano 0°

medi Jeans jest ortezą unieruchamiającą staw kolanowy. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu kolanowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

Korzyści produktu

- wyciągane szyny stabilizujące przyśrodkowa, boczna i tylna.
- przyjemny, przyjazny skórze materiał frotte, łatwy do prania.
- design koloru w stylu Jeansu.

Sposób działania

- unieruchomienie kolana w pozycji pod kątem 0°

Instrukcja dotycząca zakładania

Odpiąć wszystkie paski z rzepami i położyć ortezę pod nogą pacjenta.

Uwaga: Istnieje możliwość wydłużenia lub skrócenia boków szyny medi Classic. W tym celu należy odpiąć boczne rzepy i ponownie przymocować je w odpowiedniej pozycji.

Jeżeli jest to konieczne istnieje możliwość ograniczenia środkowych i bocznych płaskowników .

Boki szyny ułożyć wokół nogi w ten sposób, aby pozostawić wolną rzepkę kolanową.

Następnie zapiąć paski z rzepami w części szyny wokół podudzia, a później paski z rzepami w części szyny wokół uda.

Ponownie mocno ściągnąć pasek z rzepem wokół kolana.

Wskazówki dotyczące noszenia

Podczas pierwszych godzin po założeniu szyny możliwe jest wystąpienie bólu w łydkach.

Jeżeli ból wyraźnie nie ustąpi po upływie 24 godzin, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia nagłego bólu, obrzęku, braku czucia, uczucia zimnych stóp lub sinych palców u stóp, należy skontaktować się z lekarzem.

Czekając na lekarza, poluzować paski z rzepami i unieruchomić nogę do momentu otrzymania dalszych wskazówek.

Skład produktu: Aluminium, Bawełna, PU, Poliester

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- pooperacyjne unieruchomienie
- przedoperacyjne stany bólowe
- stan po zwknięciu rzepki
- po uszkodzeniu więzadeł

Przeciwwskazania

- Zakrzepica żył głębokich nogi i uda

Rozmiar

obwód uda (cm)	37 - 46	47 - 56	57 - 66
rozmiar	S	M	L
numer artykułu	5.651.0◇2	5.651.0◇3	5.651.0◇4

◇ = długość ortezy: 5 = 50cm, 6 = 60cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

Kolor: niebieski

Długość: 50 cm , 60 cm